

1 هل الكرسي المتحرك جاهز؟

<input type="checkbox"/>	هل فُحص الكرسي المتحرك للتأكد من إمكانية استخدامه بأمان، وأن جميع أجزائه على ما يرام؟
--------------------------	---

2. التحقق من مقاس الكرسي المتحرك وتعديلاته

<input type="checkbox"/>		عمق المقعد: ينبغي أن تكون المسافة بين الجزء الخلفي للركبة والمقعد/الوسادة بمقدار إصبعين.	<input type="checkbox"/>		عرض المقعد: يجب أن يكون متوائماً بدقة مع عرض الجسم.
<input type="checkbox"/>		ارتفاع مسندي القدمين: ينبغي أن يكون الفخذان مستويين على الوسادة بشكل كامل دون أي فجوات. وينبغي أن تكون القدمان مستويتين على مسندي القدمين بشكل كامل دون أي فجوات.			
<input type="checkbox"/>		ارتفاع مسند الظهر: ينبغي أن يحصل مستخدم الكرسي المتحرك على الدعم الذي يحتاج إليه، وأن يتمتع بالحرية لتحريك كتفيه من أجل دفع الكرسي (في حالة الدفع الذاتي).			
<input type="checkbox"/>		وضعية العجلات الخلفية: ينبغي أن يكون الشخص قادراً على دفع الكرسي المتحرك لصعود المنحدرات والنزول منها دون أن ترتفع العجلات عن الأرض (في حالة الدفع الذاتي). ينبغي أن تكون ذراع الشخص الذي يجلس على الكرسي المتحرك بمحاذاة المحور الخلفي عند إرخائها. وينبغي أن يكون الشخص قادراً على دفع الكرسي المتحرك لصعود المنحدرات دون أن ترتفع العجلات عن الأرض (في حالة الدفع الذاتي).			

3. التحقق من وضعية الجسم

<input type="checkbox"/>	هل يستطيع مستخدم الكرسي المتحرك الجلوس مستقيماً مع الشعور بالراحة؟
<input type="checkbox"/>	تحقق من الوضعية من الجانب.
<input type="checkbox"/>	تحقق من الوضعية من الأمام أو الخلف.

4. تحقق من ملائمة الكرسي المتحرك أثناء تحركه

<input type="checkbox"/>	هل يتيح مسند الظهر لمستخدم الكرسي المتحرك حرية تحريك كتفيه لدفع الكرسي؟
<input type="checkbox"/>	هل يوفر مسند الظهر لمستخدم الكرسي المتحرك الدعم الكافي؟
<input type="checkbox"/>	هل أقدام مستخدم الكرسي المتحرك مستقرة بشكل مستو على مسندي القدمين؟
<input type="checkbox"/>	هل وضعية العجلات الخلفية مناسبة للمستخدم؟

5. الإجراء

<input type="checkbox"/>	هل يلزم اتخاذ أي إجراء آخر؟ اكتب أي إجراءات في الملف الخاص بمستخدم الكرسي المتحرك.
--------------------------	--

تذكر أن: الخطوة التالية بعد التهيئة هي تعليم كيفية الاستخدام.