

قائمة مرجعية: هل الكرسي المتحرك جاهز للاستخدام ويمكن استخدامه بأمان؟

الكرسي المتحرك بالكامل	
<input type="checkbox"/>	لا توجد حواف حادة.
<input type="checkbox"/>	لا توجد أجزاء تالفة أو مخدوشة.
<input type="checkbox"/>	يتحرك الكرسي المتحرك في خط مستقيم.
العجلات الأمامية	
<input type="checkbox"/>	تدور بدون عوائق.
<input type="checkbox"/>	تدور دون الاحتكاك بالشوكة.
<input type="checkbox"/>	البراغي مربوطة بإحكام.
المواسير الأسطوانية المُمسكة بالعجلات الأمامية	
<input type="checkbox"/>	تدور شوكة العجلة دون عوائق.
العجلات الخلفية	
<input type="checkbox"/>	تدور بدون عوائق.
<input type="checkbox"/>	البراغي المحورية مربوطة بإحكام.
<input type="checkbox"/>	الإطارات منفوخة بشكل صحيح (يمكن أن يهبط ضغط العجلة بأقل من 5 مم عند الضغط عليها بالإبهام)
<input type="checkbox"/>	طارات الدفع آمنة.
المكابح	
<input type="checkbox"/>	تعمل على ما يرام.
مسندا القدمين	
<input type="checkbox"/>	مسندا القدمين مثبتان بإحكام.
الإطار	
<input type="checkbox"/>	بالنسبة للكرسي المتحرك القابل للطي - يمكن طي الكرسي المتحرك وفتحه بسهولة.
<input type="checkbox"/>	بالنسبة للكرسي المتحرك المزود بمسند ظهر قابل للطي - يمكن طي مسند الظهر وفتحه بسهولة.
الوسادة	
<input type="checkbox"/>	الوسادة موضوعة داخل الغطاء بشكل صحيح.
<input type="checkbox"/>	الوسادة موضوعة على الكرسي المتحرك بشكل صحيح.
<input type="checkbox"/>	نسيج غطاء الوسادة مشدود، ولكنه ليس مشدودًا للغاية.
<input type="checkbox"/>	إذا كان الكرسي المتحرك مزودًا بمقعد صلب: تغطي الوسادة المقعد الصلب بالكامل.