

Lista de verificación para una silla de ruedas segura y funcional

Toda la silla de ruedas	
No tiene bordes afilados.	<input type="checkbox"/>
Ninguna pieza está dañada, rayada o raspada.	<input type="checkbox"/>
La silla de ruedas se desplaza en línea recta.	<input type="checkbox"/>
Ruedas delanteras giratorias	
Giran sin problemas.	<input type="checkbox"/>
Giran sin tocar la horquilla.	<input type="checkbox"/>
Los tornillos están ajustados.	<input type="checkbox"/>
Ejes verticales de las ruedas delanteras	
La horquilla gira sin problemas.	<input type="checkbox"/>
Ruedas traseras	
Giran sin problemas.	<input type="checkbox"/>
Los pernos del eje están firmes.	<input type="checkbox"/>
Los neumáticos están inflados correctamente (presionando con el pulgar, la rueda puede hundirse menos de 5 mm).	<input type="checkbox"/>
Los aros propulsores están ajustados.	<input type="checkbox"/>
Frenos	
Funcionar correctamente.	<input type="checkbox"/>
Reposapiés	
Están bien sujetos.	<input type="checkbox"/>
Armazón	
Si la silla de ruedas es plegable, la silla se pliega y despliega fácilmente.	<input type="checkbox"/>
Si el respaldo es abatible: el respaldo se pliega y despliega fácilmente.	<input type="checkbox"/>
Cojín	
El cojín cabe correctamente en la funda.	<input type="checkbox"/>
El cojín entra correctamente en la silla de ruedas.	<input type="checkbox"/>
La tela de la funda del cojín está ajustada pero no demasiado.	<input type="checkbox"/>
Si la silla de ruedas tiene un asiento rígido, el cojín cubre el asiento por completo.	<input type="checkbox"/>