

Контрольний список: перевірка безпеки й готовності крісла колісного до використання

Цілісність крісла колісного	
Немає гострих країв	☐
Жодна частина не пошкоджена та не подряпана	☐
Крісло колісне рухається прямолінійно	☐
Передні поворотні колеса	
Обертаються вільно	☐
Обертаються, не торкаючись вилки	☐
Болти затягнуті	☐
Передні поворотні механізми	
Поворотна вилка обертається вільно	☐
Задні колеса	
Обертаються вільно	☐
Болти осі затягнуті	☐
Шини правильно накачані (великим пальцем можна натиснути не більше ніж на 5 мм)	☐
Ручні ободи надійно закріплені	☐
Гальма	
Працюють належним чином	☐
Підніжки	
Підніжки надійно закріплені	☐
Рама	
Для складаного крісла колісного – легко складається та розкладається	☐
Для крісла колісного з відкидною спинкою – спинка легко складається та розкладається	☐
Подушка	
Подушка правильно поміщена в чохол	☐
Подушка правильно розміщена в кріслі колісному	☐
Тканина чохла подушки щільно натягнута, але не надто туго	☐
Для крісла колісного з твердим сидінням – подушка повністю покриває сидіння	☐