

車椅子の安全・準備完了確認表

車椅子全体	
鋭い角がない	☐
部品に破損や傷がない	☐
車椅子がまっすぐ走る	☐
前方キャスター輪	
抵抗なく回転する	☐
フォークに接触しないで回転する	☐
ボルトが固く締まっている	☐
前方キャスター受け具	
キャスターフォークが抵抗なく旋回する	☐
駆動輪	
抵抗なく回転する	☐
車軸ボルトが固く締まっている	☐
タイヤへ適切に空気が入っている（親指の圧力で、凹みが5 mm未満）	☐
ハンドリムがしっかり取り付けられている	☐
ブレーキ	
適切に作動する	☐
足台	
足台がしっかり取り付けられている	☐
フレーム	
折りたたみ式車椅子の場合：容易に折りたためて開ける	☐
背もたれ前倒し式車椅子の場合：背もたれが容易に折りたためて開ける	☐
クッション	
クッションがカバーに正しく収まっている	☐
クッションが車椅子に正しく載っている	☐
クッションカバーはぴったり合っているが、きつ過ぎない。	☐
車椅子がソリッド座面を備えている場合：クッションがソリッド座面全体を覆っている	☐